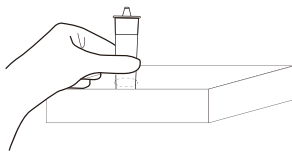
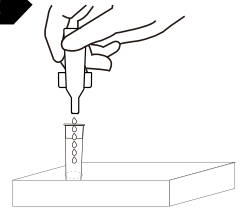
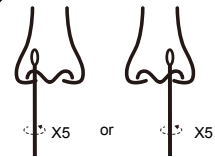
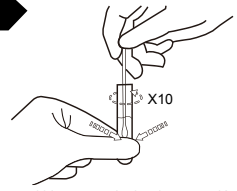
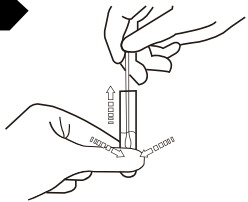
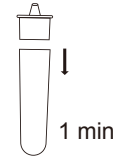
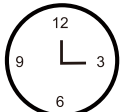
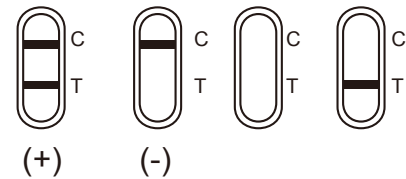
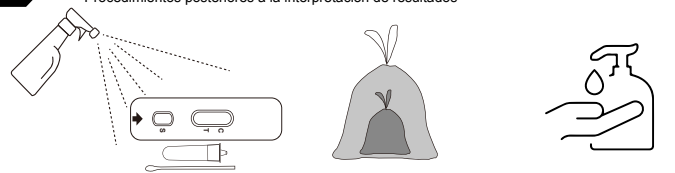


Singclean® COVID-19 Test Kit Procedimiento Auto-testeo

1  El envase del test unitario tiene un orificio para ser usado como superficie de trabajo. Coloca el tubo de extracción en el orificio.	2  Agrega 6 gotas del buffer de extracción.	3  Mantenga la cabeza ligeramente inclinada y e inserte lentamente el hisopo a través de la cavidad nasal (alrededor de 2-4 cm), gire 5 veces y gírelo suavemente para quitar el hisopo.	4  Inserte el hisopo en el tubo de extracción. Rgire el hisopo unas 10 veces mientras presiona la cabeza del hisopo contra la pared del tubo para liberar el antígeno del hisopo. Esperar durante aprox. 1 minuto.	5  Retire el hisopo mientras aprieta la punta del tubo para extraer el líquido del hisopo.	6  Instale el gotero en el tubo de extracción y tápele herméticamente, y déjelo reposar aprox. durante 1 minuto.	7  Abra el empaque de aluminio y saque el cassette de testeo.
8  Aplice 3 gotas de la solución extraída sobre la ventanilla de prueba.	9  Espera a que aparezca la línea de color. El resultado debe leerse en 15 minutos. No interprete el resultado después de 20 minutos.	10  Positivo Negativo Invalido	11 Procedimientos posteriores a la interpretación de resultados  Aplice limpiador casero o un spray de alcohol al 70% - 75% para desinfectar superficies y componentes de testeo. Coloque elementos de testeo en bolsa plástica. Cierre la bolsa y coloque en otra bolsa plástica. Deschete la bolsa según norma de desecho biológico y eliminación de residuos. Lavar muy bien manos y aplicar un desinfectante.			